

verkoop door:

US|med
MEDIZINPRODUKTE

Bunte Berna 31 | 34123 Kassel
T: +49 (0)561.766 86 35 | F: +49 (0)561.766 86 36
www.usmed-medizinprodukte.de
info@usmed-online.de



EMODIAL

EXIT-POCKET® WP



EMODIAL

Via Finati, 4/A - Ferrara - ITALY
Tel. +39 0532 978198 - Fax +39 0532 978414
www.emodial.com - info@emodial.com

Ref. DE0013H.USMED - Rev. 08/2026

Waterdichte
Katheter
bescherming
verbandzak

EXIT-POCKET® WP

BESCHRIJVING

Medisch hulpmiddel voor de bescherming van de katheteruitgang (KAST) en de katheterverlengingen. Waterdichte, aan vier zijden gesloten tertiaire verbandzak voor bevestiging op de huid.

TOEPASSING

Beschermingsapparaat voor de katheteruitgang (EXIT) en de katheterverlengingen bij contact van de patiënt met water (douchen, baden, zwemmen)

INDICATIE

Bescherming van de katheteruitgang (EXIT) en de katheterverlengingen. Geschikt voor alle centraal veneuze en peritoneale kathetersystemen. Het verbandzakje is volledig waterdicht en voorkomt zo microbiële besmetting.

VOORDELEN

- Snel en eenvoudig aan te brengen.
- Comfortabele pasvorm.
- Verhoogt de levenskwaliteit van gecatheteriseerde patiënten.
- Eenvoudig en snel te verwijderen.
- Geen vochtopname in het primaire en secundaire verband.
- Voorkomt katheterinfecties.

Gepatenteerd

Waterdichte verbandzak voor bescherming van katheters

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig de huid rondom de katheter voorzichtig met ronddraaiende bewegingen, beginnend van binnenuit, met behulp van geschikte reinigingsmiddelen.
2. Dep droog zonder te wrijven.
3. Breng de katheterverlengstukken in het verbandzakje. Gebruik eventueel het aanwezige katheterzakje (non-woven).
4. Verwijder de folie van de plakstrip.
5. Plaats de onderrand van de plakfolie op de onderrand van de katheterverlenging of het primaire verband en plak het verband van onder naar boven volledig vast om plooiën te voorkomen. LET OP: Als er een primaire verband aanwezig is, zorg er dan voor dat de kleeffolie van de verbandzak deze niet overlapt.
6. Druk de kleebranden met de hand aan om een optimale hechting op de huid te garanderen (dit is belangrijk voor de dichtheid van de verbandzak). Wacht na het aanbrengen 10 minuten totdat de klee kracht volledig is ingetreden



Code	Z-Index nr. Verpakkingsnr.	Afmetingen (CM) Opening	Indicatie	Stuks / Doos
S2005H/WP #703192201	174 820 54 180 546 159 220 060 1	ø 5	Douchen/ Baden	50 St.
S2011H/WP #703192203	174 824 61 180 546 159 227 68	9x10 (BxL)	Douchen/ Baden	50 St.
S2013HL/WP #703192206	174 830 42 180 546 159 227 75	13x11 (BxL)	Douchen/ Baden	50 St.
S2013H/WP #703192205	174 830 18 180 546 159 227 82	11x13 (BxL)	Douchen/ Baden	50 St.
S2007HL/WP #703192211	174 824 45 180 546 159 228 043	7x5,5 (BxL)	Douchen/ Baden	25 St.
S2007H/WP #703192210	174 824 10 180 546 159 228 036	5,5x7 (BxL)	Douchen/ Baden	25 St.

CLASSIFICATIE	• MEDISCH PRODUCT - KLASSE I	CE	• GECERTIFICEERD
BIOCOMPATIBILITEIT	• IN OVEREENSTEM-MING MET UNI EN ISO 10993-NORM		
STERILISATIE	• NIET-STERIEL		
HOUDBAARHEID	• 2 JAAR		
	• VOOR EENMALIG GEBRUIK		